

KULLANIM KILAVUZU

Bisolviral

AĞIZ SPREYİ

Soğuk algınlığı virüslerine karşı

CİHAZ TANIMI

Bisolviral, soğuk algınlığına karşı bir ağız spreyidir. Kullanımı kolaydır ve hızlı etki başlangıcına sahiptir. Bisolviral, ağız boşluğundaki mukozaya zarını kaplayarak soğuk algınlığı virüslerine karşı koruyucu bir bariyer oluşturur. Bu bariyer, üst solunum yollarında epitel hücrelerinin enfeksiyonunu önlemek için soğuk algınlığı virüslerini hapseder, etkisiz hale getirir, yayılmasını ve çoğalmasını durdurur.

KULLANIM AMACI

Soğuk algınlığı ve soğuk algınlığı semptomlarını/ üst solunum yolu enfeksiyonu benzeri semptomları/ grip benzeri semptomları tedavi eder ve hafifletir.

UYARILAR

Bileşenlerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız / alerjiniz varsa Bisolviral Ağız Spreyi'ni kullanmayınız.

Klinik bilgi bulunmadığından bu ürünü hamilelik veya emzirme döneminde kullanmayınız.

Ürünü ağız ve / veya boğaza yönelik cerrahi müdahaleden sonra doktorunuza danışmadan yara iyileşene kadar kullanmayınız.

Solunum yollarını tahriş ederek öksürüğe ve ses kısıklığına neden olabileceğinden spreyi uygularken solumayınız.

Küçük parçaların yutulmasına ilişkin kazaları önlemek için çocukların erişmeyeceği yerlerde saklayınız.

Ateşiniz yüksekse veya belirtileriniz normal soğuk algınlığındakinden daha şiddetli ise, başka bir nedeni olabileceğinden bir doktora danışınız.

Hastalığın yayılmasını önlemek için ürün yalnızca bir kullanıcı tarafından kullanılmalıdır.

En iyi etki için, kullandıktan sonraki 20

dakika içinde bir şey yemeyiniz veya içmeyiniz.

Ambalaj hasar görmüşse veya açılmışsa kullanmayınız.

ENDİKASYONLAR

Soğuk algınlığı virüslerine maruz kalındığında veya soğuk algınlığı semptomlarının görüldüğü erken dönemde kullanılmalıdır. Bisolviral, yetişkinler ve 4 yaşın üzerindeki çocuklar için uygundur.

KONTRENDİKASYONLAR

Bilinen bir kontrendikasyonu yoktur.

OLASI YAN ETKİLER

Bilinen bir yan etkisi yoktur.

Bisolviral kullanırken herhangi bir istenmeyen etki görürseniz, lütfen bir doktora danışınız.

KLİNİK FAYDALAR

- Bisolviral soğuk algınlığı virüslerine karşı korur.
- Bisolviral enfeksiyonun erken aşamasında kullanılırsa, soğuk algınlığının süresini kısaltmaya yardımcı olabilir.
- Bisolviral soğuk algınlığı semptomlarını hafifletir ve boğaz ağrısını yatıştırır.

Bisolviral, hastalık günlerinin sayısını % 54'e¹ kadar veya 3,5 güne^{1,2} kadar azaltabilir.

Bisolviral, soğuk algınlığı virüslerini % 99'a kadar azaltır³.

KULLANIM TALİMATLARI

Ne zaman kullanılır?

Soğuk algınlığı semptomlarını fark ettikten sonra veya enfeksiyon riskinin yüksek olduğu katıbalık yerlerde bulunma gibi soğuk algınlığı virüslerine maruz kalma ihtimali durumunda en kısa sürede Bisolviral kullanmaya başlayınız. Semptomlar düzeline kadar veya virüse maruziyet bitene dek Bisolviral kullanmaya devam ediniz.

Nasıl kullanılır?

1. Ağızınızı açınız ve püskürtücü başlığı boğazınıza doğru tutunuz (Şekil 1).
2. Pompayı aşağı doğru bastırınız ve soğuk algınlığı virüsüne maruz kaldığınız süre boyunca veya belirtiler ortadan kalkıncaya kadar günde en fazla 6 defa olacak şekilde her iki saatte bir 2 kez (1 doz) püskürtünüz.

sanofi
L001TR-02



Şekil 1

Nasıl Etki Gösterir?

Bisolviral, iki ana bileşen gliserol ve morina tripsininden oluşur. Ana bileşenler birlikte üç yoldan etki eden etkili bir bariyer oluşturur.

Hapseder: Gliserol, virüsleri hapseden ozmotik olarak aktif geçici bir bariyer oluşturur.

Etkisiz hale getirir: Tripsin, virüslerin bağlanma yeteneğini engeller, hücreleri enfekte etme yeteneklerini devre dışı bırakır.

Korur: Bisolviral bariyeri ağız boşluğunu ve boğazı korur.



HAPSEDER ETKİSİZ HALE GETİRİR KORUR

Bisolviral'in Ambalaj İçeriği

Bisolviral 20 ml - mentollü

Şişe, pompa, püskürtücü başlık, ve koruyucu kapaktan oluşan ağız spreyi.

Bisolviral Ağız Spreyi; gliserol, su, doğal bir enzim olan morina tripsini, etanol (<1%), kalsiyum klorür, trometamol ve mentol içerir. Solüsyon şekerlidir ve koruyucu, gluten veya laktoz içermez.

Kullanım kılavuzu.

MUHAFAZA VE SAKLAMA

Ürün etiketi ve ambalajı üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız.

25°C veya altında saklayınız.

Kullanılmayan ürünü eczanenize iade ediniz.

Yerel önerilere göre kullanılmış veya kullanılmamış ürünü geri dönüştürerek çevreyi korumamıza yardımcı olun.

SEMBOLERİN TANIMLARI

Kullanım kılavuzuna bakın

Üst sıcaklık sınırı

Son kullanma tarihi

Parti kodu

Katalog numarası

Üretici

Uyarı, kullanım kılavuzuna bakın

Ambalajı hasar görmüşse kullanmayın

101035 Bisolviral 20 ml

Tıbbi Cihaz

CE

0477

ÜRETİCİ

Enzymatica AB

IDEON Science Park, SE-223 70 Lund,

İsveç

info@enzymatica.com

enzymatica.com

İTHALATÇI FİRMA

Opella Healthcare Tüketici Sağlığı A.Ş.

Büyükdere Cad. No: 193

Şişli-İstanbul

Tel: 0212 339 10 00

Faks: 0212 339 59 80

Etkinliği klinik olarak kanıtlanmıştır.

REFERANSLAR

¹ Clarsund M, et al. (2017) A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Pilot Clinical Study on ColdZyme® Mouth Spray against Rhinovirus-Induced Common Cold. Open Journal of Respiratory Diseases, 7, 125-135.

² Glen Davison, Eleanor Perkins, Arwel w. Jones, Gabriella M. Swart, Alex R. Jenkins, Hayley Robinson and Kimberley Dargan (2020) ColdZyme® Mouth Spray reduces duration of upper respiratory tract infection symptoms in endurance athletes under free living conditions, European Journal of Sport Science.

³ Clarsund et al., Common cold prophylaxis using ColdZyme® Mouth Spray. XXXII Congress of the Nordic Association of Otolaryngology, Copenhagen 2014.

Güncellenme tarihi: Ekim 2020

L001TR-02